




Kit heaume STARMed pour VNI et CPAP

Guide d'installation rapide



Soins Intensifs ▪ Interfaces Patient ▪ STARMed

Kit avec heaume StarMed CaStar pour VNI et CPAP

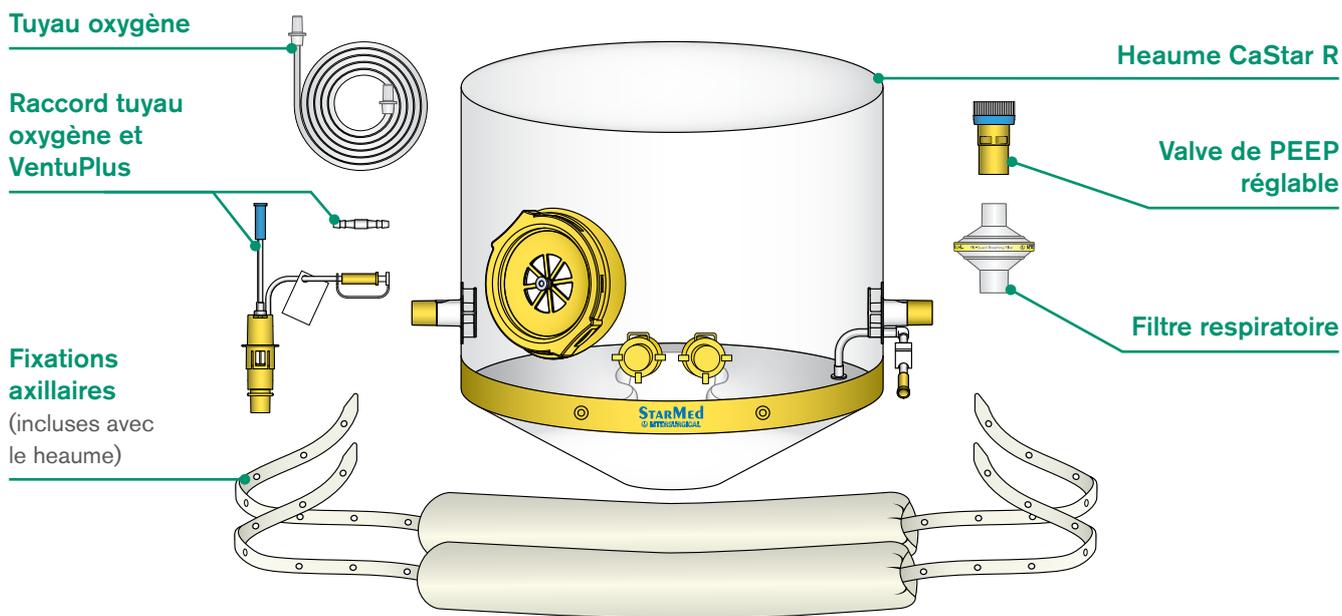

Le heaume CaStar R est une interface-patient confortable, polyvalente et légère pour VNI. Il est conçu pour offrir une alternative efficace et confortable aux méthodes traditionnelles d'assistance respiratoire non invasive. Le heaume est bien toléré lors d'utilisations prolongées et peut réduire le risque associé à l'intubation endotrachéale ou à l'utilisation d'un masque facial.

Principalement utilisé avec un respirateur mécanique de VmNI (ventilation mécanique non invasive), le CaStar R est une interface polyvalente pouvant tout aussi bien être utilisée pour fournir une thérapie CPAP optimale via un générateur à débit constant et une valve mécanique de PEEP.

Intersurgical propose un kit complet offrant toute la souplesse nécessaire pour instaurer une thérapie respiratoire : le même heaume peut être utilisé avec un respirateur mécanique pour VmNI, ou il peut être utilisé pour délivrer une CPAP via un équipement externe ou grâce à un accessoire pratique : le système de débit venturi VentuPlus.

Le kit est constitué des composants suivants :

- Heaume VNI CaStar R avec valve de sécurité bidirectionnelle et coussin cervical gonflable
- Système de débit venturi VentuPlus et extensions O₂
- Filtre respiratoire bactérien/viral
- Valve de PEEP réglable 0-20 cmH₂O avec raccord 22F

Kit pour VNI et CPAP avec heaume CaStar R, système de débit venturi, filtre respiratoire et valve de PEEP


Référence	Taille	Tour de cou	Qté/bte
CP1170XXL/2R	Extra Extra Grand	≥50cm	5
CP1170XL/2R	Extra Grand	45-52cm	5
CP1170L/2R	Grand	40-47cm	5
CP1170M/2R	Moyen	34-41cm	5
CP1170S/2R	Petit	27-34cm	5
CP1170XS/2R	Extra Petit	17-27cm	5

Le Kit avec heaume CaStar R inclut les produits Intersurgical ci-dessous. Ceux-ci peuvent également être commandés séparément. Veuillez vous référer à notre site web pour consulter la gamme complète d'accessoires.


Référence	Description	Qté/bte
CP211*/2R	Heaume CaStar R pour VNI avec coussin cervical gonflable, valve de sécurité bidirectionnelle et hublot d'accès patient (* à remplacer par les lettres de taille XXL, XL, L, M, S ou XS)	5
CP924	Générateur accessoire de débit venturi VentuPlus	10
1174000	Tuyau oxygène, 1.8m	125
1690000	Filtre respiratoire Flo-Guard	50
SPV22F	Valve de PEEP réglable, 0-20 cmH ₂ O, avec raccord 22F	10



CONFIGURATION CPAP N°1 : avec double débitmètre O₂

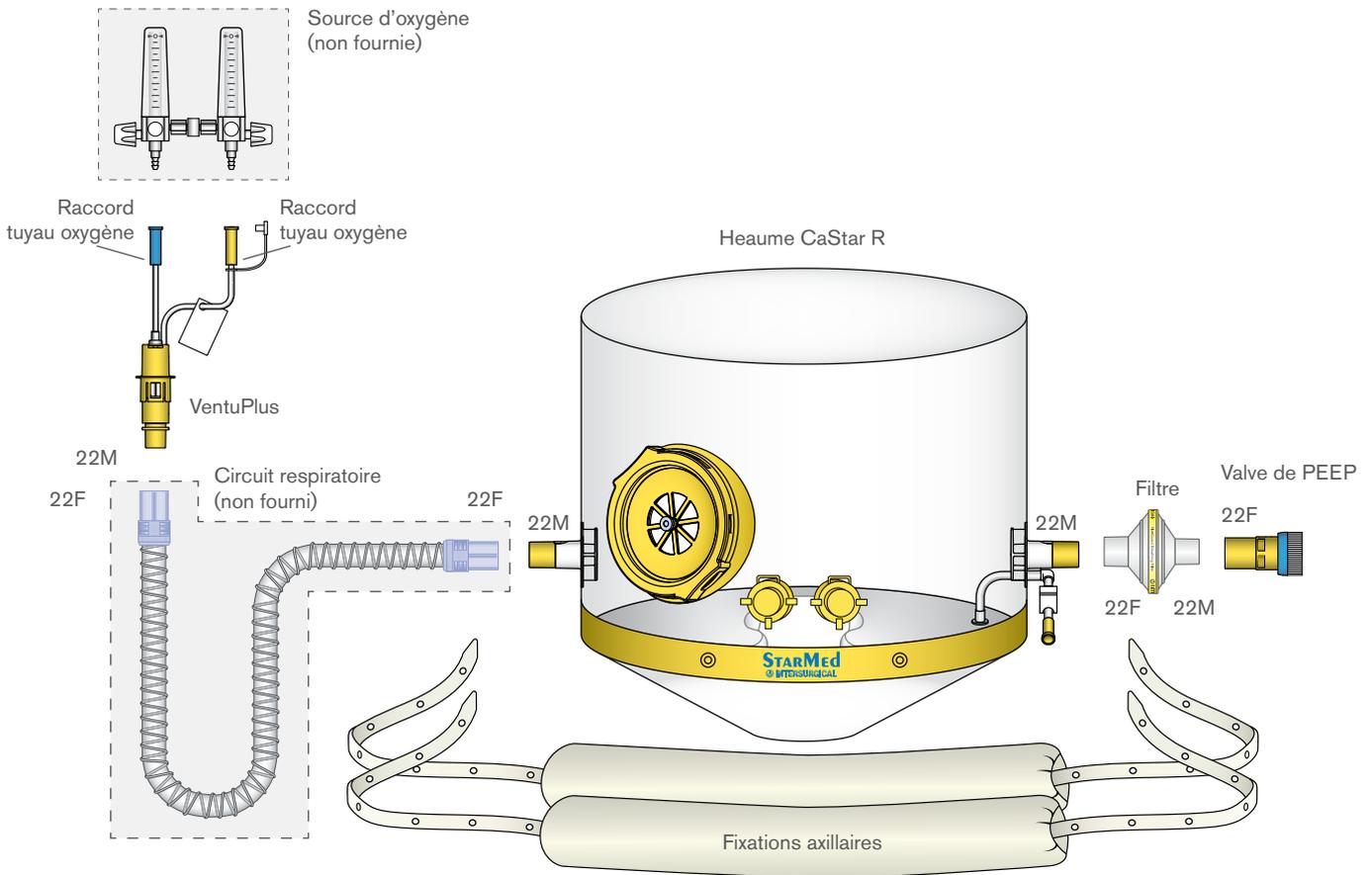


CONFIGURATION CPAP N°2 : avec deux débitmètres O₂ séparés

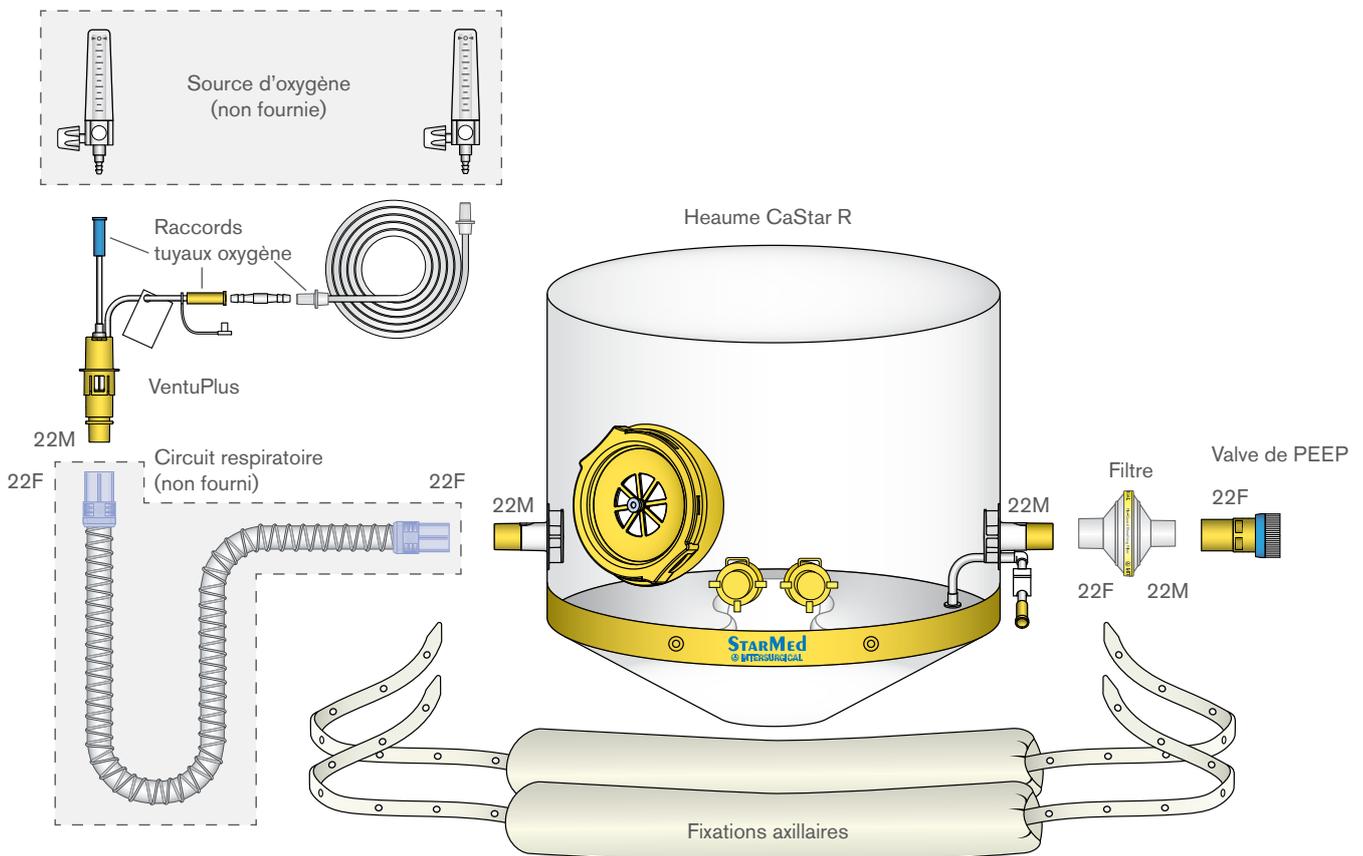




CONFIGURATION CPAP N°3 : avec un seul débitmètre O₂ (% O₂ délivré = 40%)

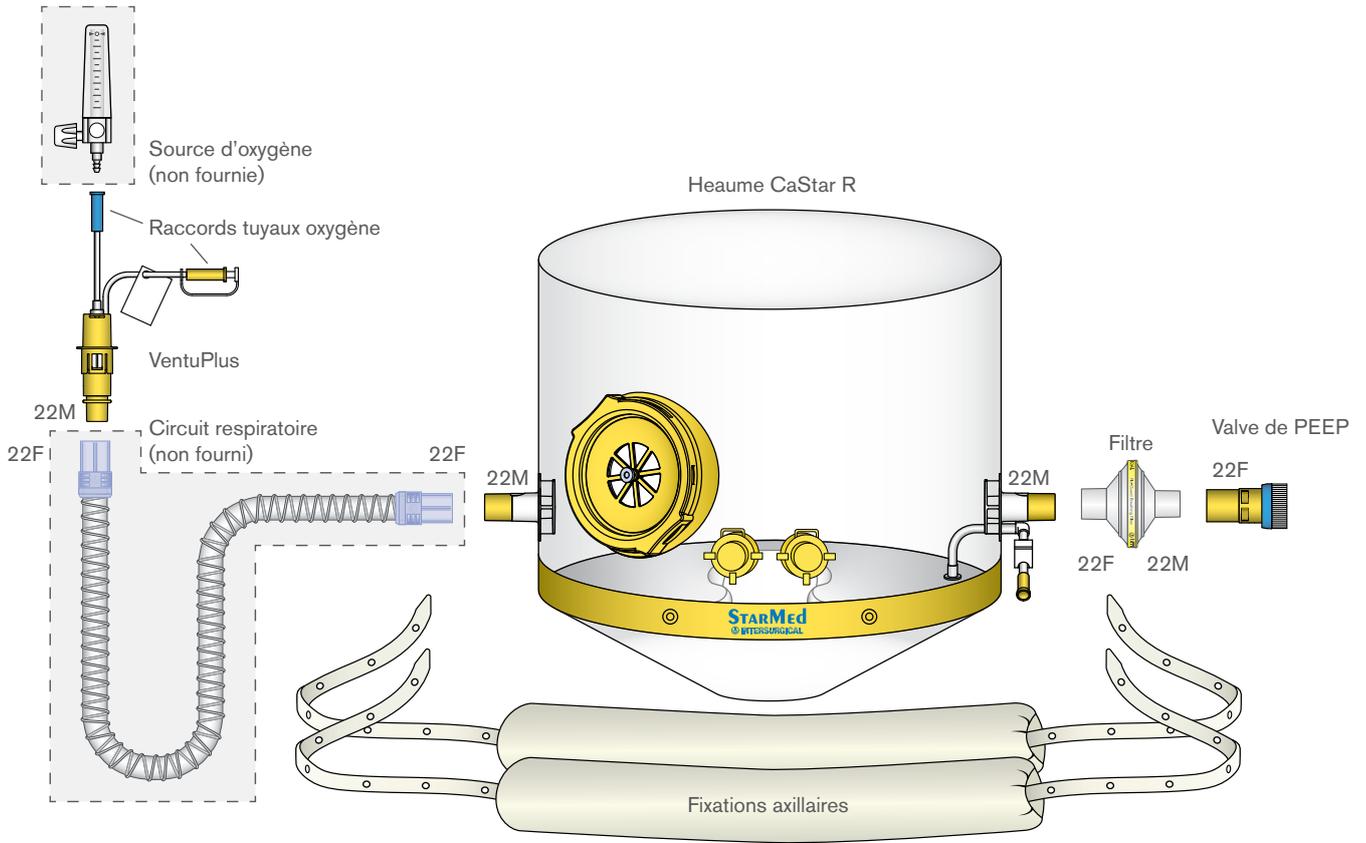


CONFIGURATION CPAP N°4 : avec un générateur de débit CPAP

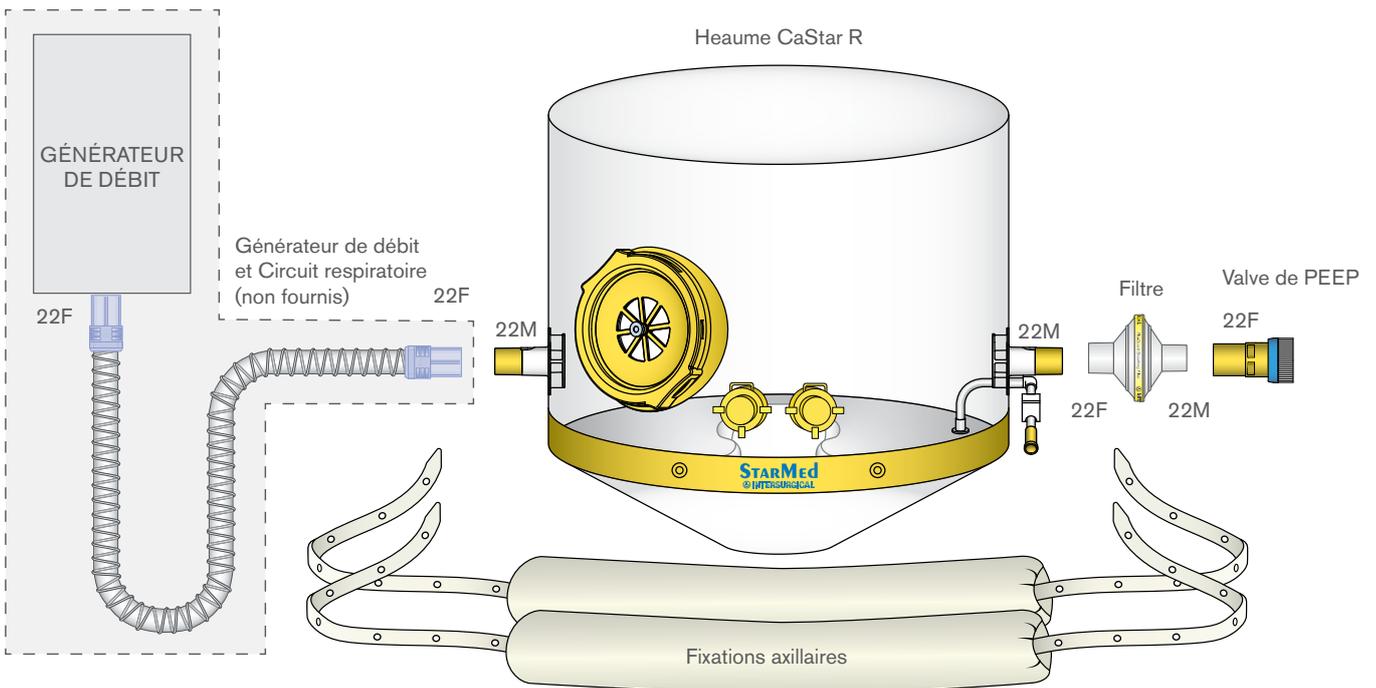



CONFIGURATION VNI : avec un respirateur mécanique de Soins Intensifs et circuit double branche

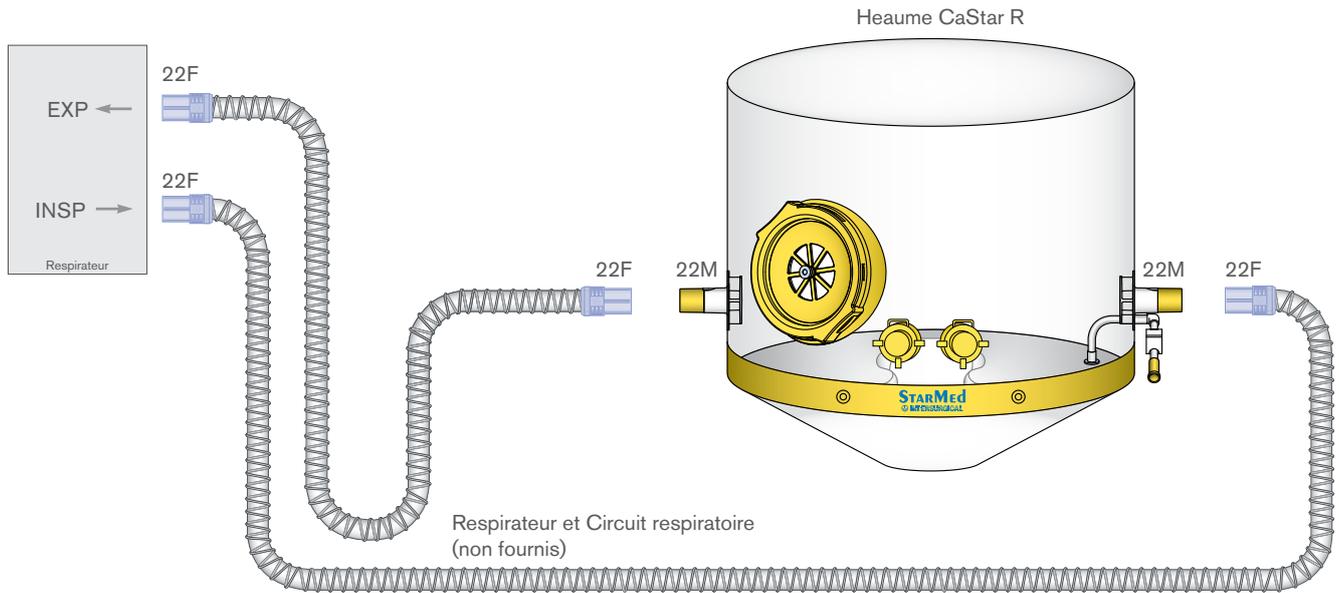

▶ Vidéo heaume CaStar R disponible sur www.intersurgical.fr

Page dédiée StarMed :



www.intersurgical.fr/info/starmed

Base de données cliniques StarMed :

STARMed

Heaumes et
masques respiratoires
base de données cliniques



starmedevidence.intersurgical.com



7 Bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Fabricant :
Intersurgical S.p.A.
Mirandola (MO) Italie

IS1.55_FR • Issue 1 03.21