

Guide d'installation de l'InterCooler™



Matériel nécessaire : unité InterCooler, support de montage, circuit respiratoire bichauffé et kit d'adaptation InterCooler



Montez l'humidificateur sur le support de montage InterCooler approprié.



Montez l'InterCooler sur le support de montage InterCooler approprié.



Insérez la poche de collecte des liquides dans l'InterCooler.



Insérez la cassette InterCooler en vous assurant que le bord arrière est situé **sous** l'ergot dans l'embase de l'InterCooler.



Poussez la cassette vers le bas et **pressez le loquet**. Assurez-vous que le **loquet soit enclenché** sur la face avant de la cassette (voir fig.1 page suivante).



Connectez la **branche expiratoire** à fil chauffant sur le raccord 22mm **mâle** de la cassette InterCooler.



Connectez la **branche de retour** au raccord 22mm **féminelle** de la cassette InterCooler.



Connectez l'autre extrémité de la **branche de retour** sur le **respirateur**. Si une **filtration** est requise, utilisez le filtre 7 jours **Air-Guard Clear 7**.



Allumez l'InterCooler en **pressant le bouton d'alimentation**. Le bouton **s'allume en vert** si le système est **correctement configuré**.

Remplacer la poche de collecte des fluides*



Quand la **poche de collecte des liquides** est **pleine**, le bouton d'alimentation **clignote en bleu**.



Pour **remplacer** la poche de collecte des liquides **pressez** le loquet de l'InterCooler **pour libérer la cassette**.



Retirez la poche de collecte **pleine** et **remplacez-la** par une **nouvelle**.



Insérez une **nouvelle poche** de collecte des liquides.



Poussez la **cassette** vers le **bas** et **pressez** le **loquet**. Assurez-vous que le **loquet** soit **enclenché** sur la face avant de la **cassette** (voir fig.1 ci-dessous).



Le bouton **s'allume en vert** si le système est **correctement configuré**.

A Noter : La ventilation n'est pas interrompue lors du changement de la poche de collecte des liquides.

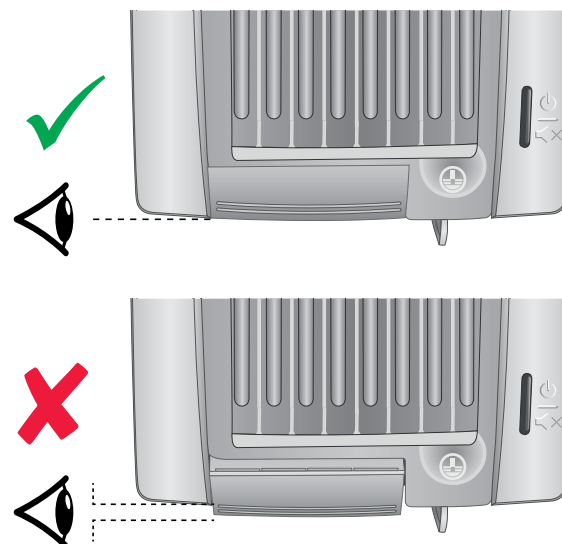


Figure 1: S'assurer que le loquet est enclenché sur la face avant de la cassette.

intercooler_sg FR • Issue 2.1 06.25