



Cricalot

Kit d'entraînement à la cricothyroïdotomie chirurgicale



Gestion des Voies Aériennes ▪ Cricothyroïdotomie chirurgicale



Cricalot

Cricalot est un simulateur procédural pour la cricothyroïdotomie chirurgicale. Cricalot répond au besoin d'un kit d'entraînement de cricothyroïdotomie anatomiquement précis, réaliste et économique, permettant aux cliniciens de s'exercer régulièrement à cette procédure survenant rarement, mais pouvant sauver des vies.



Précision anatomique

Chaque kit Cricalot contient une paire de modèles, homme et femme, avec cartilage cricoïde anatomiquement précis, afin de se familiariser avec les anatomies masculines et féminines. Une fois ouvert, le boîtier coulissant de chaque modèle fait office de sternum, permettant la stabilisation du larynx et de la main de l'opérateur tenant le scalpel, soit deux éléments critiques de la procédure de cricothyroïdotomie.

Peaux factices

200 peaux et 2 rouleaux de rembourrage en coton sont fournis avec chaque Cricalot. Le rembourrage en coton peut être placé dans la poche d'une peau pour simuler l'épaisseur désirée. Du sang artificiel peut également être ajouté dans la peau pour obtenir un modèle encore plus réaliste.

Simple à utiliser et économique

Les peaux sont économiques et disposent d'une face adhésive, permettant ainsi une application aisée sur chaque modèle. Après utilisation, elles sont rapides à retirer et à remplacer.

Contenu du kit Cricalot :

- 1 modèle femme
- 1 modèle homme
- 200 peaux
- 2 rouleaux de rembourrage en coton
- 6 trachées de rechange



Caractéristiques et avantages

Le kit Cricalot jouit d'un nombre de caractéristiques offrant des avantages significatifs aux utilisateurs.

Sternum

Une fois ouvert, le boîtier coulissant des modèles Cricalot fait office de sternum, permettant la stabilisation du larynx et de la main de l'opérateur tenant le scalpel, soit deux éléments critiques de la procédure de cricothyroïdotomie

Peaux factices

Poches en plastique, économiques et aisément remplaçables, permettant d'ajouter du sang artificiel pour un modèle encore plus réaliste



Modèle homme et femme

Chaque kit Cricalot contient deux modèles, homme et femme, permettant de s'entraîner avec une représentation précise du cartilage cricoïde féminin et masculin

Larynx

Avec mouvement latéral permettant de manipuler le larynx pour identifier la membrane cricothyroïdienne

Trachée

La trachée offre un toucher plus souple, afin de la distinguer du cartilage cricoïde. Les anneaux trachéaux sont présents sur l'extérieur comme dans l'intérieur de la trachée

REF	Description	Qté/bte
3131000	Cricalot kit d'entraînement à la cricothyroïdotomie chirurgicale	1



Cricalot est idéal pour un usage avec le kit de formation Control-Cric™ (REF : 313-4568)

Le kit de formation Control-Cric est une version d'entraînement, non stérile, du Control-Cric, permettant ainsi de se familiariser avec le principe du Control-Cric, dans le cadre d'un programme régulier de formation. Le kit de formation Control-Cric est facilement différenciable du kit clinique, grâce à la couleur jaune de l'emballage, du Cric-Key™ et du Cric-Knife™.



A Noter : Le kit de formation Control-Cric n'est pas conçu pour un usage sur l'homme.

REF	Description	Qté/bte
313-4568	Control-Cric kit de formation	10

Cricalot est fabriqué par cricalot.com et distribué par Intersurgical Ltd.

Control-Cric™, Cric-Key™ et Cric-Knife™ sont fabriqués par Pulmodyne Inc et distribués par Intersurgical Ltd.

A Noter : Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Veuillez contacter notre filiale locale.

IS6.29 FR • Issue 1 04.26